

使用上の注意

バイファケイテッドニードルは、滅菌されていません。ご使用の際は必ず滅菌して下さい。

バイファケイテッドニードルはティスポーザブル製品です。

再滅菌（煮沸）又は再使用しないで下さい。

皮膚に直角に軽く圧迫し傷をつける際に、ねじったり、ひっかいたり、また出血させないで下さい。非特異的反応が強く出てしまい診断の信頼性がおちます。

バイファケイテッドニードル

取扱説明書

問い合わせ先

株式会社東京エム・アイ商会

〒104-0013 東京都中央区新川1-5-13

TEL 03(3551)7873

FAX 03(3551)7318

E-mail info@tokyo-mi.jp



- ▶ 本製品のご使用にあたり「取扱説明書」をよく読んでから使用してください。
- ▶ 不適切なご使用は診断・治療の障害になるばかりではなく、事故にもつながります。
- ▶ 「取扱説明書」をなくさないように大切に保管してください。

使用上の注意

バイファケイテッドニードルは、滅菌されていません。ご使用の際は必ず滅菌して下さい。

バイファケイテッドニードルはティスポーザブル製品です。

再滅菌（煮沸）又は再使用しないで下さい。

皮膚に直角に軽く圧迫し傷をつける際に、ねじったり、ひっかいたり、また出血させないで下さい。非特異的反応が強く出てしまい診断の信頼性がおちます。

バイファケイテッドニードル

取扱説明書

問い合わせ先

株式会社東京エム・アイ商会

〒104-0013 東京都中央区新川1-5-13

TEL 03(3551)7873

FAX 03(3551)7318

E-mail info@tokyo-mi.jp




- ▶ 本製品のご使用にあたり「取扱説明書」をよく読んでから使用してください。
- ▶ 不適切なご使用は診断・治療の障害になるばかりではなく、事故にもつながります。
- ▶ 「取扱説明書」をなくさないように大切に保管してください。


はじめに

このたびはバイファケイテッドニードルをお買上いただき、ありがとうございます。バイファケイテッドニードルはアレルギー皮膚テスト針で、感度・特異性・一致率がとてもよく、アレルギーの診断・治療にたいへん効果的です。陰性コントロールが殆ど出ないので判定が容易です。


取扱方法

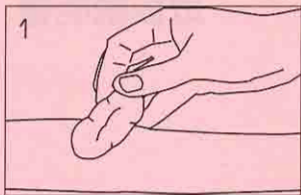

バイファケイテッドニードルを滅菌した後前腕屈側面(あるいは背中)をアルコール綿にて消毒し乾燥させます。

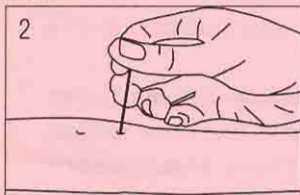

滅菌したバイファケイテッドニードルを2cm間隔で皮膚に直角に軽く圧迫します。圧迫することにより皮膚に傷がつきます。

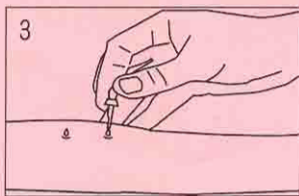

傷をつけた皮膚に抗原液を1滴ずつ滴下し判定をします。

判定方法

検査後15分～30分の間で行います。膨疹5mm以上または発赤15mm以上、あるいは陰性コントロールの膨疹径に2倍以上を陽性とします。小児を対称としたものでは膨疹径3mm以上または発赤径10mm以上という判定基準もあります。強い反応では偽陽であることがあるので記録します。また、遅発型反応が出る場合もあるので記録しておきます。