

Soffio

ジェット式ネブライザ
Aerosoltherapy Device

取扱
説明書



この度は、ジェット式ネブライザ ソフィオをお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように大切に保管してください。

◎本器は医療用吸入器です。必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。
また薬剤の種類・用量・用法についても必ず医師または薬剤師の指導に従ってください。

安全上のご注意

- ◎ ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しくお使いください。
誤ったご使用による不具合や、故障に対して当社は一切、
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示について



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、
人が障害を負う可能性および物的損害の発生
が想定される内容を示します。


目次

商品構成と仕様について	……………	P 2
使用方法	……………	P 3・4
お手入れについて	……………	P 5
トラブルシューティング	……………	P 6
購入後のサポート	……………	P 7
お問い合わせ先	……………	P 8
別売品一覧 / イヤーパックのご案内	……………	P 9
保証規定 / 品質保証書	……………	P 10

商品構成と仕様について

商品構成


ソフィオには次のものが化粧箱に入っています。万が一不足のものがありましたら、販売店または当社までご連絡ください。

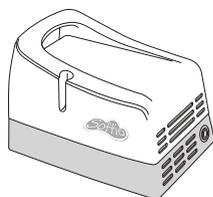


① 器械本体



② 薬液ボトル AL

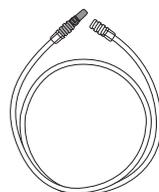


③ PVCチューブ(C)

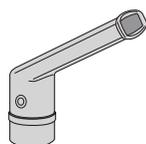

④ マウスピース2000



⑤ 電源コード(100V用)

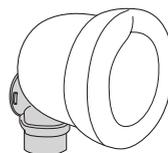

⑥ パーフェクタ(スペーサーマスク)



⑦ キャリングバッグ

⑧ 取扱説明書(品質保証書) ⑨ 添付文書

※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

仕様


販売名	ソフィオ
クラス分類	一般医療機器(クラスI)
類別	器76 医療用吸入器
一般的名称	非加熱式ネブライザ
医療機器届出番号	13B2X10072000020
吐出圧力	0.13MPa
吐出流量	7ℓ/min
空気力学的粒子径中央値(MMAD)	1.9μm(生理食塩水使用時)

本体寸法	190×130×120mm
本体重量	約1.5kg
定格電源	AC100V 50/60Hz
電撃に対する保護の形式	クラスII機器
電撃に対する保護の程度	B形装着部
E M C 規格	IEC 60601-1-2:2001に適合


使用方法

薬液ボトル AL の準備

- 1** 薬液ボトル AL の上部のフタを反時計回りにまわし、取り外します。下部カップの中心部にバッフル AL を奥までしっかりと差し込みます。その周りから医師から処方された薬液を注ぎます。

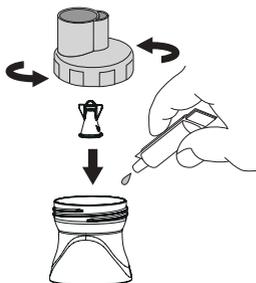

- 2** 薬液ボトルALに上部フタを時計回りにとまるまで、しっかりと取り付けます。マウスピース 2000 又はパーフェクタ等を上部フタに取り付けます。

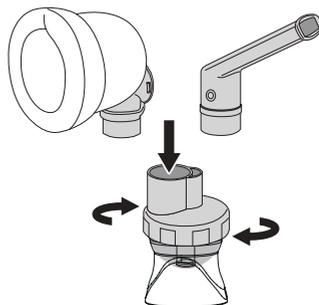


器械本体の準備

- 1** 器械本体を机等の、かたくて平らな場所の上に置いてください。




布製品等のやわらかな物の上で使用すると、本体底部の吸気口が布等を吸い込んでしまい本来の噴霧能力が得られず、正常な吸入が行えません。

- 2** 器械本体の空気吐出口に PVC チューブ (C) のプラスチックコネクタ側を差し込みます。もう片方を、薬液ボトル AL の下部に接続します。

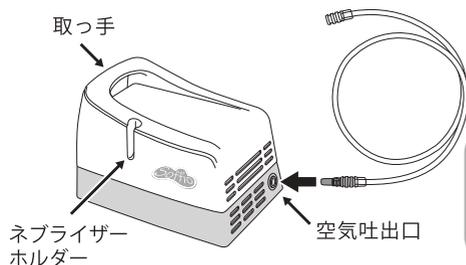

チューブの接続は抜けない程度に差し込んでください。必要以上に差し込まれますと、プラスチックコネクタや器械本体が破損するおそれがあります。

- 3** 電源コードを器械本体の電源コード接続口に差し込みます。コンセントプラグをコンセント電源(100V用)に、しっかりと差し込みます。

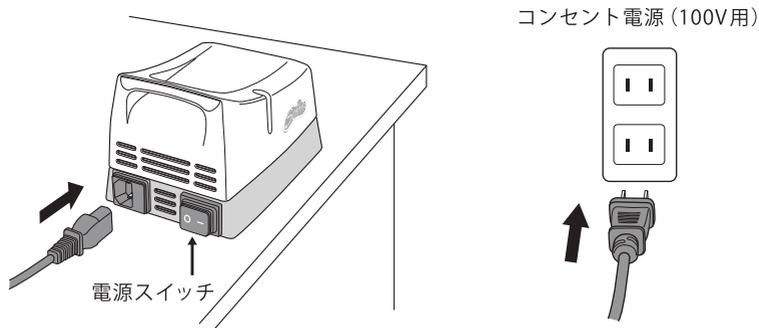

電源コードの取扱いは、濡れた手で行わないでください。

感電などの危険があります。

電源コードは器械本体に巻き付けしないでください。また、コンセントプラグを抜くときは電源コードを引っ張る等乱暴に取り扱わないでください。

吸入する

- 1** 薬液ボトル AL にマウスピース 2000、パーフェクタ等が正しく装着され、電源コードの接続を確認した後、本体電源スイッチを ON (I) にします。

椅子などに座り、楽な姿勢で吸入してください。

※吸入するには薬液ボトル AL 下部カップを持って吸入します。

またネブライザーホルダーで、固定させての吸入も可能です。

- 2** 薬液が少なくなり、噴霧が断続的になってきたら、薬液ボトル AL 側方を軽く叩いて薬液を下部カップの中心部に落としながら、吸入してください。

※薬液は 0.4mℓ 程度残ってしまいます。

- 3** 吸入終了後は電源スイッチを切って (O)、電源コードを外してください。



この際、必ずコンセントプラグを持って、コンセント電源から外してください。コードを持って取り外すと、断線などの故障の原因となります。

お手入れについて


お手入れ

吸入後は速やかに吸入部品を全て取り外します。薬液ボトルALを(1)上部フタ、(2)バッフルAL、(3)下部カップに分解し、残った薬液を捨てます。分解した部品を流水または、ぬるま湯ですすぎます。

消毒方法

※正常な噴霧を得るためにも週1回程度の煮沸消毒を行ってください。

【煮沸消毒】 部品の全て入る容器に十分な水と部品を入れて沸騰させます。沸騰したらそのまま10分程度煮沸します。

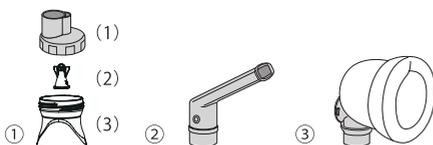

煮沸消毒可能な部品

- ① 薬液ボトルAL
〔(1) 上部フタ (2) バッフルAL (3) 下部カップ〕
- ② マウスピース 2000
- ③ パーフェクタ (スパーサーマスク)

PVC チューブ (C)



注意

PVCチューブ(C)は煮沸消毒をしないでください。変形して使用できなくなる原因となります。

【薬液消毒】 消毒方法は煮沸消毒を推奨いたしますが、消毒薬を用いる場合は次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど)を推奨いたします。消毒液につけておく時間は、各消毒液の取扱説明書に従ってください。消毒後、清潔な水で十分水洗いをし、柔らかい清潔な布等で水分を拭き取り、十分に自然乾燥させて、清潔に保管してください。




注意

洗浄・乾燥には食器洗浄機、電子レンジ、ヘアードライヤー等の使用は絶対にさけてください。変形して使用できなくなる原因となります。

フェルトフィルターのお手入れ

器械本体底部には吸気口があり、マイナスドライバーのようなものでフィルターカバーをとると、フェルトフィルターを取り出せます。

※フェルトフィルターの交換目安は概ね2ヶ月程度です。

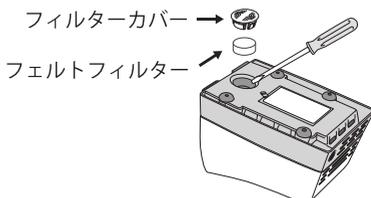

トラブルシューティング

? 「故障かな?」と思ったらここをチェック。

トラブルシューティングを試しても、吸入を行うことができない場合、お手数ですが **お問い合わせ先** (P8) までご連絡ください。

こんなときは	ここをチェック	対策
器械本体が作動しない。	電源コードと本体側接続口に電源コードがしっかりと差し込まれているか?	電源コードを本体側接続口にしっかりと差し込みます。 (P4 器械本体の準備 3へ)
	電源コードはしっかりとコンセント電源(100V用)へ差し込まれているか?	電源コードをコンセント電源(100V用)にしっかりと差し込みます。 (P4 器械本体の準備 3へ)
器械は作動し吐出口から空気は出ているが正しい噴霧が得られない。	薬液ボトル AL 上部フタが、しっかりと取り付けられているか?	薬液ボトル AL へ上部フタをしっかりと時計回りで取り付けます。 (P3 ネブライザー本体 2005の準備 2へ)
	薬液ボトル AL 下部カップ中心部にバッフル AL が、しっかりと差し込まれているか?	薬液ボトル AL 下部カップ中心部にバッフル AL をしっかりと差し込みます。 (P3 ネブライザー本体 2005の準備 1へ)
	バッフル AL や薬液ボトル AL 中心部の小さな空気口が、つまっていないか?	薬液ボトル AL を全て分解して、煮沸してください。 (P5 お手入れ へ)
	薬液ボトル AL 等の吸入部品を6ヶ月以上使用していませんか?	吸入部品を別売しておりますので、必要な部品をお買い求めください。 (P9 別売品一覧 へ)
突然、器械が作動を停止した。	数十分間、連続で使用していませんか?	器械本体内部のモーターが過熱により、過昇温度防止装置が自動的に作動してスイッチが切れた可能性があります。電源スイッチを切(○)にして、電源コードのプラグを外し、20分以上休ませてください。 (※正常な温度に戻れば、使用することが出来ます。)


購入後のサポート



トラブルシューティング (P6) 等を試しても、吸入を行うことができない場合、**お問い合わせ先** (P8) へお電話ください。
スタッフが器械の状態をお伺いします。



お客様

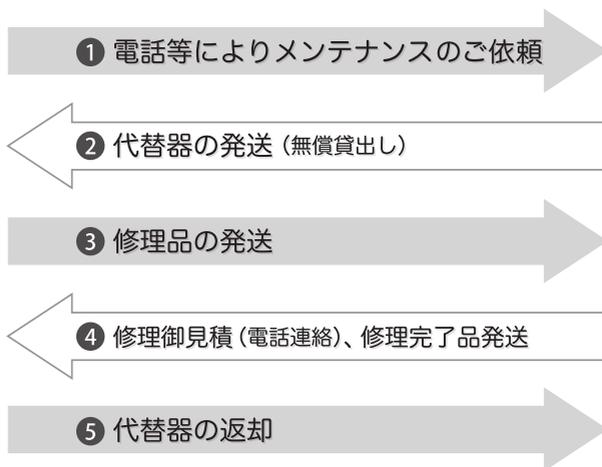

東京エム・アイ商会



修理期間中は、代替器を無償貸出ししております。
※代替器は必ずしも、お持ちの器械と同一機種を手配できるとは限りません。
※代替器を発送する際の送料も無償です。
※器械本体には、一年間の無償保証期間があります。
ただし、吸入部品等の消耗部品は保証対象外になります。



お問い合わせ先

製造販売業者

株式会社 東京エム・アイ商会

〒135-0023 東京都江東区平野 3-2-6

TEL **03-6458-5588**

FAX **03-6458-5518**

<https://www.nebneb.com/>

✉ info@nebneb.com



NebNeb.com

検索



※通話料・通信料、プロバイダー料等はお客様のご負担になります。

受付時間 **9:00 - 17:00** 月～金（土・日・祝日・年末年始除く）



別売品一覧 / イヤーパックのご案内

別売品一覧

お求めは販売店または当社（お問い合わせ先 P8）までご連絡ください。

名称	商品コード	JANコード	標準小売価格(税込)
薬液ボトル AL	0550011	4571137140908	¥1,595 (税込)
バッフル AL	0550041	4571137140939	¥220 (税込)
マウスピース 2000	0550030	4571137140953	¥550 (税込)
PVC チューブ (C)	0550160	4571137140922	¥440 (税込)
電源コード (100V用)	0550400	4571137140359	¥2,200 (税込)
フェルトフィルター	0550340	4571137140298	¥110 (税込)
パーフェクタ(スプレーマスク)	0550450	4571137140892	¥2,750 (税込)
ノーズピース2000(L字アダプタ付)	0550090	4571137140960	¥550 (税込)
だ液トラップ	0550050	4571137140946	¥660 (税込)
マスク (大)	0550120	4571137140885	¥550 (税込)
マスク (小)	0550130	4571137140878	¥440 (税込)

※商品の仕様や価格は予告なく変更となることがございます。ご了承ください。令和3年9月1日現在

イヤーパックのご案内

吸入部品の交換目安は毎日使用して、約6ヶ月となります。

安全にかつ安心して吸入して頂くためにも、交換が必要な消耗部品がセットでお買得なイヤーパックのご購入をおすすめしております。

お買得
です!

ソフィオイヤーパック セット内容

基本セット

- ★ 薬液ボトル AL
- ★ PVCチューブ (C)
- ★ フェルトフィルター



①～④のどれかひとつを選択 [セット価格]

① マウスピース 2000 唾液トラップ	¥2,515 (税込)
② マスク (大)	¥2,305 (税込)
③ マスク (小)	¥2,200 (税込)
④ パーフェクタ	¥3,666 (税込)

保証規定 / 品質保証書

◎ 保証規定

1. 取扱説明書、添付文書等の注意書にしたがった正常の使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には、無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、当社へご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - (イ) ご使用上で取り扱いの過誤による故障および損傷。
 - (ロ) 製品の改造・不当な修理により発生した故障。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害や電源の異常電圧・指定外の使用・電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・シリアル No・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - (ト) 消耗部品。
 - (チ) その他取扱説明書（本書）に記載のない使用方法による故障および損傷。
4. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

この度は、当社商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を維持して出荷されております。しかし、通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

商品名 ジェット式ネブライザ ソフィオ

シリアルNo. SF

ご芳名 _____

ご住所 _____

TEL () _____

お買い上げ店名 _____

住 所 _____

TEL () _____

お買い上げ年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

製造販売業者

TMI 株式会社 東京エム・アイ商会

〒135-0023 東京都江東区平野 3 丁目 2 番地 6 号



Soffio