

# ニールメッド・サイナス・リンス 取扱説明書

一般医療機器 器55番 医療用洗浄器  
一般的名称: 手動式生体用洗浄器  
届出番号: 13B3X1018800001  
(鼻洗浄ボトルに関する記載)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。


## 鼻洗浄のサイナス・リンス キット

### 洗浄ボトルと生理食塩水を使った鼻洗浄(鼻うがい)

# NeilMed

## SINUS RINSE™

本品は、鼻洗浄用のボトル容器と、調合済みサッシュエ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されます。調合済みサッシュエは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mlの水と混合して洗浄液を生成します。ボトル容器を押すことで、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミやチリ、花粉を洗い流します。1日1~2回の鼻洗浄をお勧めします。

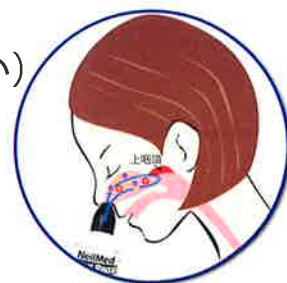

### 使用上の注意

**重要** ● 鼻・耳の炎症、鼻づまりがひどい場合は、ご使用前に専門医の指導を受けてください。 ● 使用後に鼻を強くかまないでください。

- ご使用になる前にボトルに傷や不具合がないかご確認ください。もし、不具合があった場合は、下記の「製品問い合わせ先」までお電話ください。新品にお取り替え致します。
- 痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止し、専門医の指導を受けてください。
- 鼻・耳の手術後の方は主治医の指導を受けてください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- お子様(5歳以上)がご使用される際は保護者が必ず立ち会って下さい。
- 調合済みサッシュエは、必ずニールメッド専用のボトル容器でご使用ください。
- 必ず体温(36℃)ほどのお湯で洗浄してください。
- 感染する可能性がありますので、ボトル容器は他の人との共用はしないでください。
- ボトル容器は清潔な場所で保管し、衛生のために3ヶ月に一度交換してください。
- 鼻腔に残留した洗浄液が、時間が経過した後には少々流れ出てることがあります。
- 使用の際は、体調をふまえ、自己責任の上でご使用ください。不安がある方は専門医にご相談ください。

### 効果

鼻洗浄をおこない、鼻腔内のゴミやチリを洗い流します。

### 性能に関する事項

- ① ボトル容器は240mlの生理食塩水を作ることができ、ボトルを押すと中の洗浄液がスムーズに流れるよう設計されています。
- ② 調合済みサッシュエは、ボトル容器240ml、1回使いきりの容量です。(残った洗浄液は捨ててください)

### 使用方法



- 1 はじめに手をきれいに洗い、36℃程度のお湯240mlをボトルに入れてください。キャップを開けます。
- 2 次にサッシュエ(洗浄液の素)を入れてください。
- 3 キャップをボトルにしっかり取り付け、キャップ穴を塞ぎこぼれないようにボトルを振ってください。
- 4 頭を下げ、口で息をしながらボトルをゆっくり握り液を押し出すと、もう一方の鼻孔から洗浄液が流れ出ます。
- 5 反対側も同じ手順で行い、終わったら、鼻をティッシュ等でやさしくかみます。(強くかむと耳に水が入る恐れあり)

### 使用後のメンテナンス

- ① 使用後、残った洗浄液を捨て、ボトル、キャップ、チューブを流水で洗います。
- ② ボトルに水を入れ、キャップをしたボトルを激しくシェイクします。  
※このとき、中に入れた水が飛び出さないよう、キャップの先端を指で押さえます。
- ③ ボトルを強く押し、チューブとキャップの内側を洗浄します。  
サッシュエの成分(塩分)がボトル内に残らないようにしてください。  
※手のひらなどでキャップ先端をカバーし、水が飛び散らないようにします。
- ④ ボトルを空にして、キャップを外し、水切り用のグラス立てなどを使い、それぞれに水分が残らないよう乾かします。  
汚れがひどい時は、ボトルに水を入れて後、食器用中性洗剤を数滴垂らし、③の手順で洗ってください。  
洗浄後は、洗剤の成分が残らないように、十分に洗い流してください。

### 内容物

- ボトル容器(リフィルにはボトルは含まず)
- 調合済みサッシュエ
- 取扱説明書



### 保管方法及び使用期間等

- ① 使用後は室内の乾燥した場所で保管してください。
- ② ボトル容器は劣化、汚れ、雑菌の繁殖を防ぐため3ヶ月に一度の交換を推奨します。

### 製造元

NeilMed Pharmaceuticals, Inc.  
601 Aviation Blvd.,  
Santa Rosa, CA 95403 USA

### 輸入者

ニールメッド・ファーマスーティカルズ株式会社  
〒143-0001 東京都大田区東海4-7-11  
TEL.03-5755-9876

販売者  
製品問い合わせ先

**NeilMed™** ニールメッド・ファーマスーティカルズ株式会社  
〒143-0001 東京都大田区東海4-7-11

TEL.03-5755-9876